

Reducing Body System 3036

Mere: dolž. 480 x globina 520 x višina 1004 Barvni zaslon



Predal za opremo

Prostor za opremo.

Barva vozička: modra ali siva.

REDUCING BODY SYSTEM je nova oprema, ki so jo raziskovalni laboratorij Overline izpopolnili z namenom, da rešijo celotno problematiko, ki se navezuje na celulit, na mastna tkiva in na sproščanje kože. Kombinacija vseh treh delovnih sistemov omogoča, da se z eno samo rešitvijo dosežejo tri funkcije in sicer radio frekvenco, endotermično masažo in nizko frekvenčni ultrazvok (kavitacija). Če se te tri funkcije uporabljajo v kombinaciji omogočajo doseganje optimalnih rezultatov med zdravljenjem raznih tipologij ne-estetičnosti, ki so lahko prisotne v globini kože. REDUCING BODY SYSTEM deluje na površinskem območju kože potom terapije z radio frekvenco medtem ko se globlje ležeča območja dosegajo s kavitacijo. Če se ti terapiji združita z endotermično masažo so rezultati presenetljivi v zelo kratkem času. Njegova učinkovitost je precejšnja tudi med tretmajem obraza in telesa za doseganje kožne regeneracije in pomladitve. REDUCING BODY SYSTEM je bil projektiran kot pomoč kozmetičarki/kozmetičarju v njihovem specifičnem delovnem procesu med celotno dobo trajanja tretmaja, in opozarja bodisi akustično bodisi vizualno, vsako spremembo faze tretmaja, opozarja katero držalo je treba aktivirati in na katere cone telesa je treba ukrepati s končnim ciljem, da se v največji meri olajša tretma stranke.

Površinsko delovanje: Terapije z Radio frekvenco (glej tudi OVER 3080) omogočajo doseganje rezultatov za odpravo celulita, za sproščanje kože in za kožne gube (stretchmarks) kajti spodbujajo proizvodnjo kolagena, elastina in hialuronske kisline s čim se doseže kožno ravnovesje v tretmajih bodisi obraza bodisi telesa.

Globinsko delovanje: Nizkofrekvenčni ultrazvoki (glej tudi OVER 3046) (-30kHz) pa delujejo na lokalizirano maščobo in na globlji celulit, potom delovanja mikro mehurčkov, ki implodirajo in povzročajo implozijo maščobnih celic ter omogočajo znižanje adipocitov v izredno kratkem času.

Masažno delovanje in drenaža: Terapije z endotermično masažo, združene s kromoterapijo (glej tudi OVER 3035) so koristne med odpravljanjem ne estetskega celulita, med sproščanjem kože in med zdravljenjem problematike zadrževanja vode. Če se njegovi programi uporabljajo po opravljeni terapiji z nizko frekvenčnimi ultrazvoki pospešijo izločanje adipocitov preko krvnega sistema in delno tudi preko limfatskega sistema, pospešujejo pomirjajoče delovanje po tretmaju anti-age.

9465 MEMORY CARD

Memory Card je praktična in učinkovita osebna kartica, s pomočjo katere je mogoče shraniti bilo kateri tip programa, program lahko oblikujete po vaši želji in ga izvajate takoj. Dovolj je, da vstavite kartico v namenski sedež.

Endotermična masaža



Kavitacija



Radio frekvenca



Endotermična masaža. 16 programov za telo + 5 programov za obraz + kromoterapija. Naprava svetuje katero držalo je treba uporabljati na začetku in med izvajanjem izbrane terapije: izvajanje posamezne terapije je vodeno s pomočjo slik, ki označujejo delovna področja in prehode, ki jih je treba opraviti za čim boljši rezultat.

Kavitacija: 9 programov za telo, razdeljenih na osnovi postave in morfologije stranke. V vsakem programu je mogoče izbrati delovne cone in določiti vrstni red o njihovem izvajanju. Poleg tega je za vsako cono možno izbrati čas trajanja tretmaja.

Radio frekvenca. 1 program za telo in 1 program za obraz. Med tretmajem je mogoče določiti časovni interval delovanja in pavze radijskih valov, kar občutno poveča fleksibilnost tretmaja, saj dopušča, da se tisti deli, ki se ravnokar obdelujejo, nekoliko spočijejo.



ISO.OLIO 100
Olio cellulite
specifico per
trattamenti
endodermici



ISO.OLJE 100
Olje za celulit, namenjen za
endotermične tretmaje

PAS



ISO.GEL 100
Gel corpo
specifico per
trattamenti
adipe e cellulite




ISO.GEL 200
Gel viso
per trattamenti
tonificanti e
rivalizzanti

ISO.GEL 100
Gel za telo
specifičen za
maščobe in celulit

ISO.GEL 200
Gel za obraz
specifičen za toničnost in
revitalizacijo

Endotermična masaža

Massaggio Endodermico

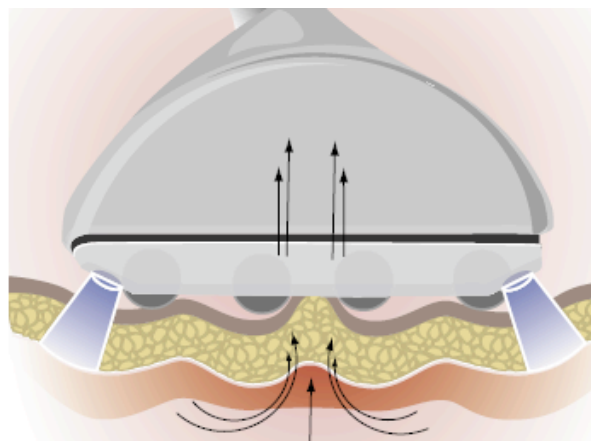

16 Programmi Corpo

16 Body Programmes

5 Programmi Viso

5 Face Programmes

16 programov za telo

PROGR. 1 Stimulans za površinski celulit z valji.

PROGR. 2. Isto kot program 1 + modeliranje s kroglicami v zadnjih 10 minutah tretmaja.

PROGR. 3 Stimulans za globinski celulit z valji.

PROGR. 4 Isto kot program 3 + modeliranje s kroglicami v zadnjih 10 minutah tretmaja.

PROGR. 5 Stimulans za površinski celulit s kroglicami, bolj primeren za območje zadnjice in bokov.

PROGR. 6 Stimulans za globinski celulit s kroglicami, bolj primeren za celulit in salo.

PROGR. 7 za vezna tkiva z valji, delujočimi na mehki in edematozni celulit.

PROGR. 8 isto kot program 7 + modeliranje s kroglicami v zadnjih 10 minutah tretmaja.

PROGR. 9 za vezna tkiva s kroglicami, delujočimi na mehki in edematozni celulit.

PROGR. 10 drenaža z valji, uporablja se v primerih edematoznega celulita, daje ton sproščenim tkivom.

PROGR. 11 isto kot program 10 + modeliranje s kroglicami v zadnjih 10 minutah tretmaja.

PROGR. 12 DRENAŽA s kroglicami ima isti učinek kot program 7. Uporabljene barve: modra, ki aktivira limfatično cirkulacijo in zelena, ki da ton sproščenim tkivom.

PROGR. 13 proti stresu s kroglicami, reaktivira in sprošča, tipično kot pri masaži.


PROGR. 14-15 splošni tretma za telo z valji in kroglicami, splošni, ne specifični program.

PROGR. 16 isto kot program 15 + modeliranje s kroglicami v zadnjih 10 minutah tretmaja.

5 programov za obraz

New System STEP BY STEP je inovativni delovni sistem za olajšanje in vodenje operaterja v vseh važnih točkah tretmaja. Ne opozarja samo na točke, kjer se je treba zaustaviti z držalom za odpiranje limfatskih ganglijev ampak tudi potrebni čas, da se to zgodi. Poleg tega vodi operaterja med zamenjavo držal znotraj vsakega tretmana in določa moč sesanja odvisno od ega, ali stranka uporablja kombinezon ali olje ISO. Vse to v pomoč kozmetičarskemu operaterju.


PROGR. 1 stimulacija
PROGR. 2 drenaža
PROGR. 3 lifting efekt
PROGR. 4 sproščanje
PROGR. 5 Prosti program

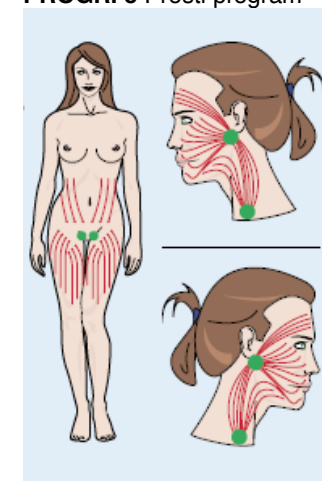

Kavitacija




Uporabljamo inovativno kovinsko ploščico s štirimi glavicami premera 35 mm, kar znaša 9,6 cm² za vsako glavico oziroma 38,5 cm² skupne površine. To dejstvo zelo poenostavi drsenje preko tretiranih površin. Uporabljeni površinski pritisk je zelo velik vendar ni invaziven.

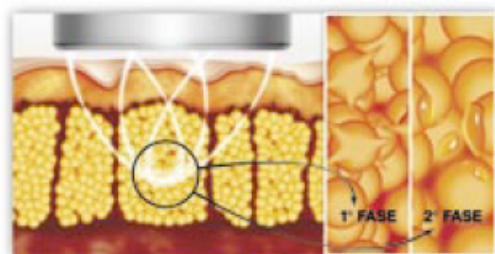

Z vnesenimi programi je mogoče izvajati 2 delovni fazi; prva je energična, druga faza pa je dejansko masaža.

Radio frekvenca

Globoko segrevanje (diatermija)

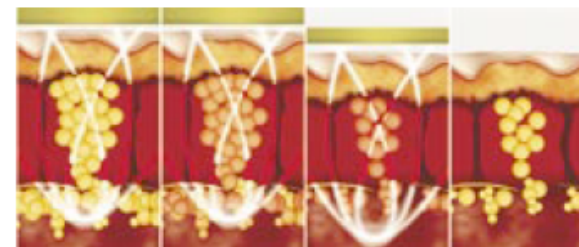

- oživlja krvno cirkulacijo
- spodbuja medcelične zamenjave
- poveča lokalno zgoznavanje maščob
- izboljša oksigenacijo mišičnega tkiva na obrazu
- stimulira proizvodnjo elastina in kolagena

